

ABENA®


# Abena Pants LO

INCONTINENCE

## ABENA® Pants



100-140 cm

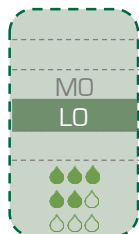

900ml

Plus d'absorptions disponibles  
sur notre gamme

**ABRI-FLEX**  
*Premium*


XS1 S1 M1 L1 XL1 ●●●● ○○○	Special S/M2 Special M/L2 ●●●● ●●○	S2 M2 L2 XL2 ●●●● ●●○	M3 L3 ●●●● ●●○	XXL1 ●●●● ○○○
1400ml	1700ml	1900ml	2400ml	1450ml

UTILISATEURS

AUTONOME

SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE MODÉRÉE

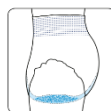

### Technologie 3D Dual Core

La technologie 3D Dual Core consiste à positionner les zones absorbantes là où elles sont le plus utile. Le cœur absorbant principal contient un deuxième cœur fin, injecté d'agents super absorbants (SAP). Le SAP est réparti de manière intelligente ; ainsi l'absorption est la plus importante au centre du cœur absorbant.



### Top Dry – Couche d'acquisition pour effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile externe supérieur. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.



### Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.




### Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.



### Super Soft

Le change est conçu à partir de non-tissé extra doux pour un confort optimal et la sensation de porter un sous-vêtement normal. La technologie de soudure par ultrasons favorise également la douceur de chaque côté du change.

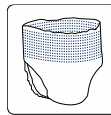

### Optimized Fit – Ceinture structurée

La ceinture structurée du change est renforcée par des fils lycra, permettant un ajustement optimal à la morphologie de l'utilisateur.



### Air Plus – Voile externe respirant

Le voile externe (BTBS) laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.



### Témoin de saturation

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide. L'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation facilement.




# Abena Pants LO

## DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose, TCF (blanchi sans chlore)
Sous-couche	Couche d'acquisition, non-tissé blanc
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Barrières	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Superabsorbant, polyacrylate, sans phtalates
Marquages	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.

## DIMENSIONS PRODUIT

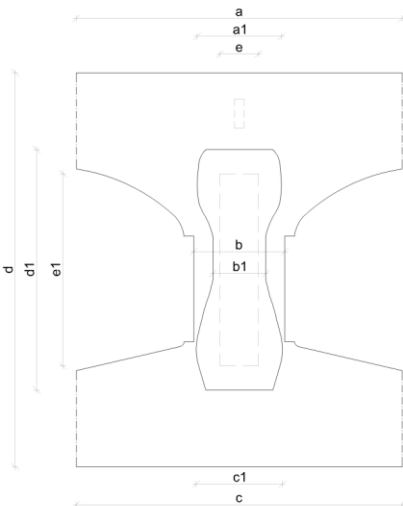

d	Longueur	880 mm
a	Largeur, devant	780 mm
c	Largeur, arrière	780 mm
b	Largeur, entre-jambes	230 mm

### Cœur absorbant

d1	Longueur	555 mm
a1	Largeur, devant	180 mm
c1	Largeur, arrière	180 mm
b1	Largeur, entre-jambes	100 mm

### Sous-couche (ADL)

e1	Longueur	400 mm
e	Largeur	80 mm

## ABSORPTION

Poids produit : 71g

Test Rothwell ISO 11948-1	900 ml
---------------------------	--------



Dispositif médical  
Classe 1  
93/42/CEE



Label FSC  
Cellulose provenant de  
forêts responsables



Testé dermato-  
logiquement  
Produits sans risques  
d'iritation



ISO 9001  
ISO 14001

OHSAS  
18001:2008

Management de la  
santé et de la  
sécurité au travail



GMP

Good  
Manufacturing  
Practices




# Abena Pants LO



## DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
6	14	84	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
12	1,270 m		
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 382581		57 03538 382598	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
75,6 x 30,1 x 37,2 cm	6 870 g	6 000 g	30 x 24 x 17 cm

## GUIDE D'UTILISATION

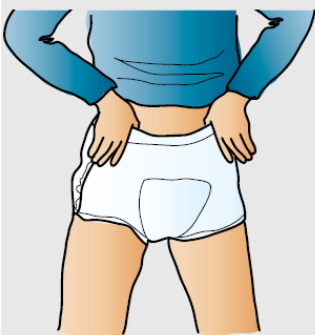

Enfiler la protection comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieure de la protection.



Après utilisation, lors du change, déchirer la protection sur le côté.




Lorsque les deux côtés sont déchirés, enrouler la protection et la jeter.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de soins de la peau et d'essuyage corporel ABENA

 [www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

